

s-line

wyrób
medyczny

system

Wyrób medyczny

CE 0481

Formuła blokująca tłuszcze i węglowodany

- W leczeniu nadwagi i otyłości
- Zmniejsza wchłanianie tłuszczu, cukru i węglowodanów z diety
- Zmniejsza apetyt
- Skuteczność potwierdzona naukowo

ZALECENIA OGÓLNE

S-line system to wyrób medyczny klasy IIa certyfikowany zgodnie z przepisami dyrektywy 93/42/EWG. Należy uważnie przeczytać instrukcję używania, nawet jeśli produkt był już wcześniej używany. Od ostatniego otwarcia opakowania niniejsze informacje mogły zostać zmienione zgodnie z nowymi badaniami i ustaleniami. Należy zachować niniejsze informacje na wypadek konieczności ich ponownego wykorzystania. **S-line system** może zapewnić zakładany efekt działania tylko wtedy, gdy jest przyjmowany zgodnie z instrukcją.

FORMA PODANIA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- Opakowanie zawiera 30 tabletek
- 1 tabletkę **S-line system** zawiera 500 mg ekstraktu z białej fasoli (**Omtec XS**[®]), 375 mg chitozanu (**Omtec 50**[®]).
 - Inne składniki: celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, stearynian magnezu.

DAWKOWANIE I STOSOWANIE:

S-line system jest przeznaczony do przyjmowania doustnego przez osoby dorosłe w wieku 18 lat i starsze. Zalecana dawka to 2 tabletki 3 razy dziennie na godzinę przed posiłkiem, popijając co najmniej jedną szklanką (250 ml) wody. Podczas odchudzania i stosowania

S-line system należy codziennie przyjmować preparat multiwitaminowy i mineralny.

S-line system obniża poziom niektórych witamin i minerałów wchłanianych przez organizm. Najlepiej przyjmować suplement witaminowo - mineralny przed snem, aby zapewnić wchłanianie witamin i minerałów przez organizm.

Nie stosować dłużej niż 30 dni w jednym okresie leczenia. Leczenie można wznowić po upływie 4 dni.

ODPOWIEDZIALNE ODŻYWIENIE I ODCHUDZANIE:

Nadwaga jest często spowodowana zbyt tłustą i wysokokaloryczną żywnością. Obejmuje ona pokarmy, takie jak fast foody, wysokotłuszczowe przekąski czy produkty zawierające dużo cukru i skrobi, na przykład ciasta, torty i ciasteczka. Produkty te często dostarczają organizmowi więcej kalorii niż potrzebuje, a nadmiar energii jest magazynowany w postaci złogów tłuszczu.

Jak działa S-line system: Omtec 50[®] to naturalny błonnik o wysokiej zdolności wiązania lipidów. Pomaga neutralizować kalorie pochodzące z żywności o wysokiej zawartości tłuszczu. W żołądku tworzy substancję podobną do żelu i miesza się z pokarmem. Jednocześnie ekstrakt **Omtec XS**[®] hamuje enzym trawiący skrobię-alfa-amylazę trzustkową. Zakłóca proces trawienia węglowodanów. W tym procesie tłuszcze, cukry i węglowodany są usuwane z żywności i wiązane w nierozpuszczalnej formie. Te związane tłuszcze, węglowodany i cukry nie wchodzą w cykl metaboliczny ale są wydalane niestrawione. Spożycie kalorii pochodzących z tłuszczu, cukru i węglowodanów zostaje znacznie zmniejszone. Ponadto ekstrakt **Omtec XS**[®] spowalnia szybkie wchłanianie węglowodanów i ma korzystny wpływ na poziom cukru we krwi, co skutkuje mniejszą chęcią podjadania.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

S-line system może być stosowany przez okres dłuższy niż cztery tygodnie pod warunkiem przestrzegania poniższych ograniczeń:

- Przed długotrwałym stosowaniem produktu należy zasięgnąć porady lekarza.
- Nie należy przyjmować produktów

237mm

150mm

lecniczych (np. środków antykoncepcyjnych), witamin lub niezbędnych kwasów tłuszczowych w tym samym czasie co **S-line system**; leki doustne należy przyjmować 1 godzinę przed lub 4 godziny po zażyciu **S-line system**.

W przypadku konieczności przyjmowania leków podczas głównych posiłków przed zażyciem **S-line system** należy skonsultować się z lekarzem.

- W przypadku wystąpienia zaparc lub innych działań niepożądanych należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

- Nie są znane żadne szkodliwe działania niepożądane, jednak po zażyciu **S-line system** może wystąpić przejściowe uczucie sytości. Zwykle ustępuje ono po krótkim czasie.
- Osoby z wrażliwym żołądkiem lub jelitami mogą odczuwać dyskomfort w jamie brzusznej, nudności, rozstrój żołądka, niestrawność, ból brzucha, gazy lub zaparcia.
Jeśli działania niepożądane nie ustąpią należy zmniejszyć dawkę lub przerwać przyjmowanie preparatu.

INTERAKCJE

Wysoka zdolność wiązania tłuszczu przez **S-line system** może również wpływać na wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i aktywnych składników produktów leczniczych. Dotyczy to na przykład hormonów zawartych w pigułkach antykoncepcyjnych lub w preparatach stosowanych w leczeniu zaburzeń menopauzy. Leki doustne należy przyjmować 1 godzinę przed lub 4 godziny po zażyciu preparatu **S-line system**.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie należy przyjmować produktu **S-line system** w następujących przypadkach:

- nadwrażliwość lub alergia na jeden ze składników;
- obecne lub przebyte zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. choroba refluksowa, zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzody żołądka lub dwunastnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego,

zapalenie uchyłków), objawy niedrożności jelit (zbliżająca się lub istniejąca mechaniczna lub porażenna niedrożność jelit), gastropareza u diabetyków z neuropatią, polipy jelit lub istniejące poważne zaburzenia trawienia (zaparcia);

- przyjmowanie warfaryny (lek rozrzedzający krew);
- niedowaga (wskaźnik masy ciała (BMI) < 18,5);
- ciąża lub karmienie piersią;
- nieodpowiednie dla dzieci i niemowląt;
- dzieci i młodzież powinny stosować **S-line system** wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

! OSTRZEŻENIA

- Nie żuć ani nie rozgryzać tabletek.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać, jeśli listek został uszkodzony.



SPOSÓB PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 5 do 25 stopni Celsjusza.



TERMIN WAŻNOŚCI

Nie stosować preparatu **S-line system** po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI INFORMACJI:

czerwiec 2020



076362 V.1.2



WYTWÓRCA:

PK Benelux BV,
Vluchtoord 17,
5406 XP Uden, NL

DYSTRYBUTOR:

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.,
ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa,
Polska



237mm

150mm