

Instrukcja**Zastosowanie:**

Aspirator Kataru Dr Psik to bezpieczne urządzenie służące do odciągania wydzieliny z nosa u niemowląt, dzieci i dorosłych. Został zaprojektowany tak, aby każdy jego użytkownik mógł go samodzielnie złożyć i rozłożyć co, zapewnia łatwe i dokładne czyszczenie poprzez płukanie ciepłą wodą, a następnie przechowywanie w dedykowanym do tego celu opakowaniu.



W przypadku stosowania u dzieci i niemowląt bądź u osób o ograniczonych zdolnościach umysłowych aspirator powinien być użytkowany wyłącznie przez osoby dorosłe. Aspirator Dr Psik należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Aspirator należy podłączyć umieszczając niebieską wkładkę w rurę ssącą odkurzacza. Odpowiednie ukształtowanie aspiratora redukuje siłę ssącą z odkurzacza na bezpieczne, a poprzez regulację tej siły umożliwia zmianę ciśnienia powietrza ssącego między komorami, dzięki czemu w prosty sposób można je dostosować do potrzeb użytkownika. Urządzenie zostało wykonane z bezpiecznego, wytrzymałego i atestowanego tworzywa najwyższej jakości.

Przeznaczenie medyczne:

1. Dzieci 0+ (od 1 dnia życia)
2. Osoby z uciążliwym problemem zalegającej wydzieliny w nosie (osoby dorosłe i starsze wymagające opieki)

Wskazania:


1. Katar infekcyjny (wirusowy i bakteryjny)
2. Katar alergiczny
3. Sezonowy nieżyt nosa

Przeciwwskazania:

1. Uszkodzona błona śluzowa nosa
2. Obrzęk błony śluzowej nosa
3. Krwawienie z nosa

Budowa urządzenia:

Aspirator kataru Dr Psik składa się z ośmiu części: komory I, komory II, komory III, komory VI, końcówki I, końcówki II, wężyka oraz wkładki do odkurzacza. Ponadto posiada dodatkową końcówkę oraz nakładkę silikonową. Wszystkie elementy znajdują się w dedykowanym do przechowywania i transportu pudełku zabezpieczającym.

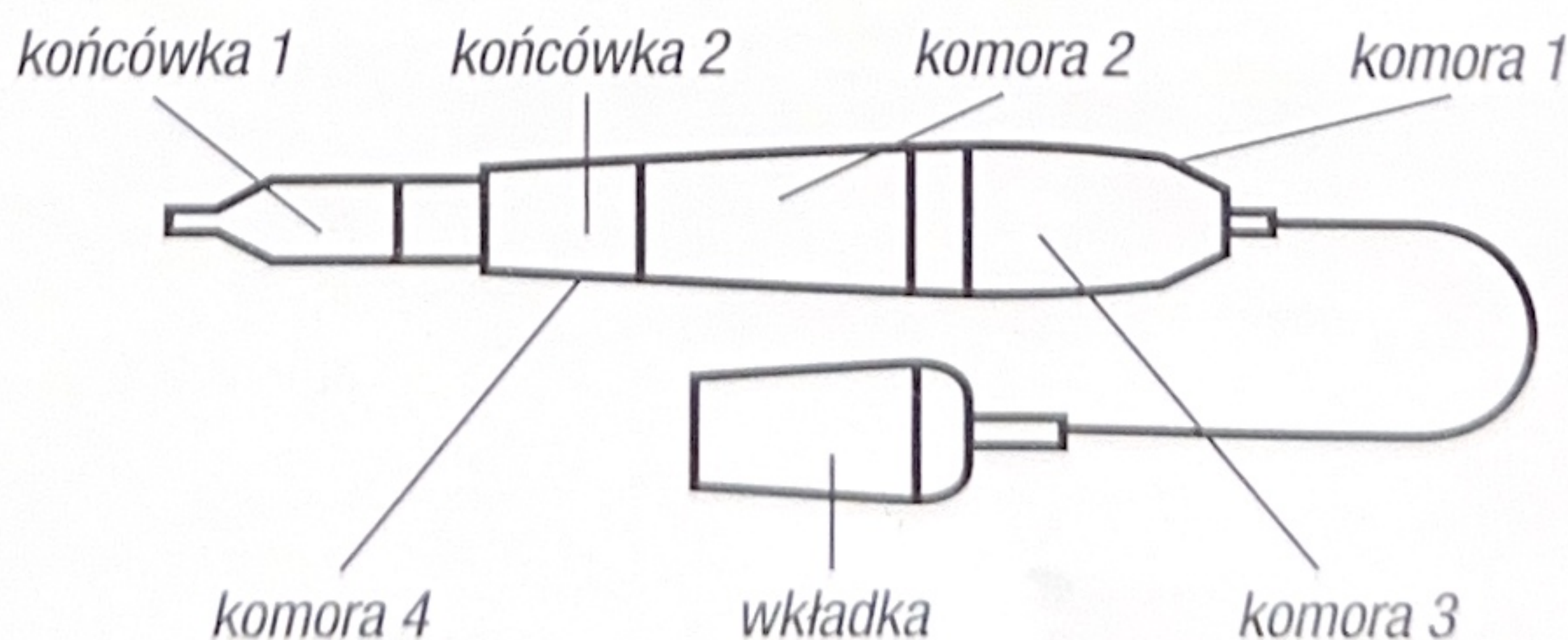

Rys. 1 Budowa aspiratora

Utrzymanie w czystości:

Aspirator kataru Dr Psik jest produkowany ze specjalnego materiału, który ~~przeznaczony~~ na utrzymanie produktu w czystości. Po każdym zabiegu rozłóż aspirator ~~zgodnie ze~~ schematem i w zależności od potrzeby wypłucz dokładnie wodą. W przypadku ~~ciężkich~~ zabrudzeń może być konieczne zastosowanie środków czyszczących ~~przeznaczonych~~ do stosowania u dzieci i niemowląt. Aspirator należy przechowywać w opakowaniu, wcześniej go osuszając.



Produkt należy umyć po każdym zabiegu. Produktu nie należy sterylizować ani gotować w wodzie, grozi to uszkodzeniem materiału z którego wykonany jest aspirator.

Sposób użycia:

1. Połącz ze sobą elementy aspiratora według schematu z rysunku nr 1.
2. Połącz wkładkę niebieską z rurą ssącą do odkurzacza domowego (o mocy między 800-1800 W).



Aspirator nie może być podłączany do odkurzaczy innych niż domowe oraz nie posiadających węża ssącego. Stosowany odkurzacz musi być sprawny i należy go podłączać do gniazdka z uziemieniem zabezpieczającym bądź innego odpowiadającego lokalnym przepisom prawa!

Uruchom odkurzacz. W zależności od potrzeb i oczekiwanej siły ssącej, użyj regulatora znajdującego się na aspiratorze pomiędzy komorami I a II. Zmianę uzyskuje się poprzez przekręcenie ich względem siebie w celu zwiększenia / zmniejszenia pola powierzchni otworu.

3. Przyłóż końcówkę aspiratora do przedsionka nosa (niewskazane jest penetrowanie komory nosa) i odciągaj katar z każdej przegrody nosowej przez czas nie dłuższy niż 5-10 s.
4. W przypadku nie odciągnięcia wszystkiej wydzieliny ponów proces odsysania.
5. Po zabiegu rozłóż aspirator zgodnie ze schematem i postępuj zgodnie z punktem – Utrzymanie w czystości.
6. Nie zastosowanie się do powyższych wytycznych może powodować negatywne skutki ze względu na możliwość zalegania we wnętrzu aspiratora bakterii i wirusów, oraz spowodować zanieczyszczenie mechaniczne wyrobu.



JO-VITAL Jowita Wietecha
ul. Spacerowiczów 49
30-444 Libertów

Dystrybutor: Medicinae Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź

Symbole użyte w instrukcji obsługi oraz na oznakowaniu:



Wytwórca



Uwaga



Przeczytaj w instrukcji obsługi



Numer partii



Oznaczenie zgodności z Dyrektywą